

Amplíe el ámbito  
de aplicación y eleve  
el confort en el trabajo



**Una amplia gama  
de posibilidades  
que se puede personalizar**

- Elevación de la trotadora para el tratamiento de perros pequeños. Protege la espalda del terapeuta mientras trabaja.
- Inclinación de la trotadora.
- Sistema de contracorriente.
- Masaje bajo el agua con chorros de agua potentes y regulados. Ayuda en la rehabilitación y en el entrenamiento de perros de trabajo o de competición.
- Inversor de marcha para cambiar la dirección de la trotadora y que el movimiento del perro pueda observarse desde ambos lados.
- Regulación de velocidad continua en función del estado de salud del paciente.
- Soporte superior con correas ideal para la rehabilitación de perros con movilidad reducida.

**Un tratamiento sin estrés para el perro**

Más fácil para subir y bajar. Gracias a su práctica puerta abatible, incluida en los tres modelos, no es necesario ningún dispositivo mecánico de elevación, evitándose el estrés innecesario en el animal.



PHYSIO-TECH GmbH  
Medizin- & Sportgerätetechnik  
Preetzer Chaussee 129  
24146 Kiel  
Deutschland

Tel. +49 431 535502-20  
Fax +49 431 535502-29  
e-mail: a.gronwald@physio-tech.com

**PHYSIO-TECH**


www.physio-tech.com

projekt realizacja:  whiteart - tel. 056-674242 - www.whiteart.pl

Edition September 2010 © PHYSIO-TECH GmbH 2010

**PHYSIO-TECH**

Trotadora subacuática  
para hidroterapia de perros

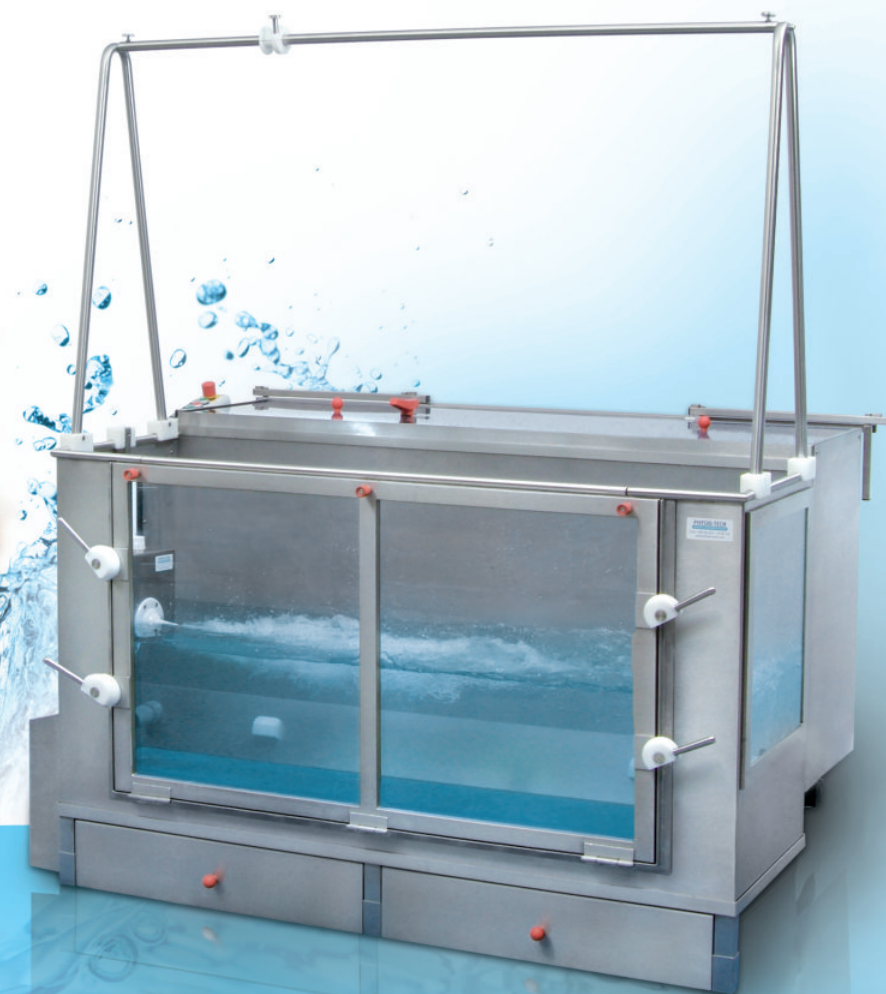





## El método terapéutico ideal para satisfacer las necesidades actuales de la medicina veterinaria

El uso de la trotadora subacuática en la hidroterapia para perros constituye un método terapéutico muy valorado en veterinaria desde hace muchos años, ya que completa las terapias clásicas en el ámbito de la ortopedia y la neurología. Aunque la eficacia del tratamiento es indiscutible, su presencia no está suficientemente extendida.

En muchas ocasiones una intervención cualitativa no basta para alcanzar un resultado plenamente satisfactorio. Solo con el correcto tratamiento de fisioterapia, que no provoca dolor alguno en el perro, se logra el máximo aprovechamiento del rango de movimientos y el fortalecimiento del tejido muscular.

La trotadora subacuática es la respuesta perfecta a las cada vez mayores exigencias de la medicina veterinaria actual. Por su parte, la hidroterapia no consiste en un pasatiempo técnico, sino en la utilización controlada del Principio de Arquímedes y de la resistencia del agua con fines terapéuticos. Gracias a la flotabilidad del agua, el cuerpo se libera de su peso y el movimiento se realiza sin dolor, consiguiendo que los animales sientan más motivación y puedan realizar movimientos a pesar de la enfermedad o la lesión que padezcan.

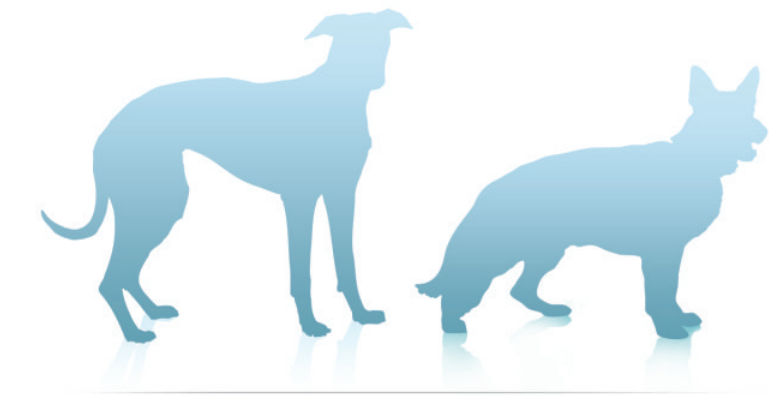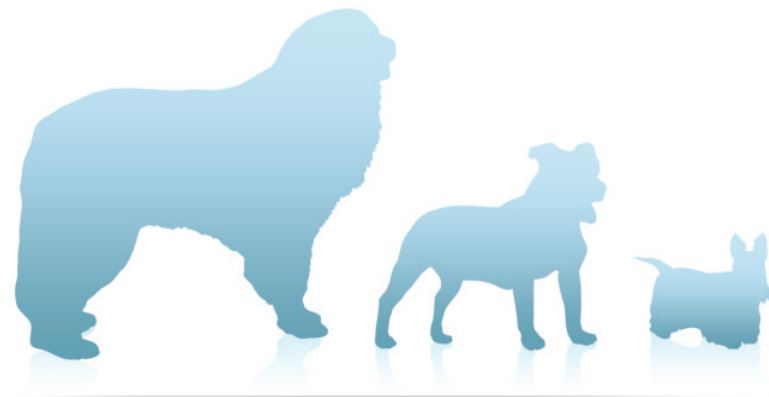

### Posibles aplicaciones de la hidroterapia para perros

Apoyo terapéutico para:

- ▶ el proceso preoperatorio
- ▶ la rehabilitación postoperatoria
- ▶ enfermedades músculo-esqueléticas (displasia, artrosis, parálisis)
- ▶ lesiones en ligamentos, músculos, tendones y columna vertebral
- ▶ entrenamientos contra la obesidad
- ▶ resistencia y entrenamiento de musculación para perros de asistencia o de trabajo




## PHYSIO-TECH TROTADORA SUBACUÁTICA PARA HIDROTERAPIA DE PERROS

EQUIPAMIENTO	MODELS		
	BASIC	XXL	DE LUXE
01 CALEFACCIÓN	✓	✓	✓
02 INVERSOR DE MARCHA DE LA TROTADORA SUBACUÁTICA	✓	✓	✓
03 MASAJE BAJO EL AGUA	✓	✓	✓
04 VENTANAS TRILATERALES	✓	✓	✓
05 ALFOMBRA DE GOMA PARA ACCESO	✓	✓	✓
06 ESCALONES RETRÁCTILES DEBAJO DE LA PISCINA	—	✓	✓
07 ELEVACIÓN DE LA CINTA	✓	✓	automatic
08 INCLINACIÓN DE LA TROTADORA SUBACUÁTICA	✓	option automatic	automatic
09 REGULACIÓN CONTINUA DE VELOCIDAD	✓	✓	✓
10 RESORTE DE GAS PARA LA PUERTA	✓	✓	✓
11 FILTRO DE AGUA INTERIOR	✓	✓	✓
12 FILTRO DE AGUA EXTERIOR CON LAMPARA UV	OPTION	✓	✓
13 ACERO INOXIDABLE COBERTURA DE VÁLVULAS / TUBOS	OPTION	✓	✓
14 SISTEMA DE CONTRACORRIENTE	OPTION	OPTION	✓
15 ARNÉS DE SOPORTE TRASERO CON CORREAS	OPTION	OPTION	✓
16 SOFTWARE AQUA PC	OPTION	OPTION	✓
17 SOFTWARE AQUA PRAXIS	OPTION	OPTION	OPTION
18 SOPORTE PARA ACCESORIOS	OPTION	OPTION	✓



El programa Aqua-Praxis es un software de administración de consultas especialmente diseñado para pequeños establecimientos de fisioterapia para animales.

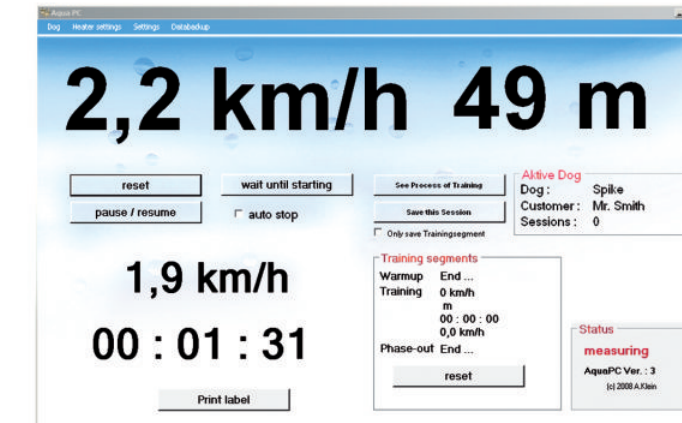

El programa Aqua-PC amplía las posibilidades de la trotadora terapéutica al recopilar todos los datos del tratamiento.

### Administración óptima de los datos del cliente y del paciente


- ▶ El programa Aqua-Praxis es un software de administración de consultas dirigido especialmente a pequeños establecimientos de fisioterapia para animales (administración de clientes, tratamientos, emisión de facturas, etc.)
- ▶ El programa Aqua-PC amplía las posibilidades de la trotadora terapéutica al recopilar todos los datos del tratamiento.

### Uso higiénico y eficiente del agua

- ▶ La doble filtración y desinfección con lámpara UV permite utilizar el agua del tratamiento durante mucho tiempo.
- ▶ Materiales de gran fiabilidad y calidad de fabricación que facilitan la limpieza y el mantenimiento.
- ▶ La trotadora se puede retirar fácilmente del contenedor para su limpieza o mantenimiento.
- ▶ Los contenedores y sus repuestos pueden tratarse química y mecánicamente para su limpieza.

### Requisitos mínimos de instalación

- ▶ Solo se necesita un espacio de unos 2 m<sup>2</sup>.
- ▶ Tensión estándar 230 V, 16 A.
- ▶ Puede transportarse fácilmente a través de cualquier puerta estándar.
- ▶ Aunque el contenedor de repuesto está integrado en el contenedor terapéutico, es fácil de desmontar.
- ▶ Carga de suelo normal.
- ▶ Mandos en la bañera para el llenado y la limpieza.
- ▶ Desagüe.

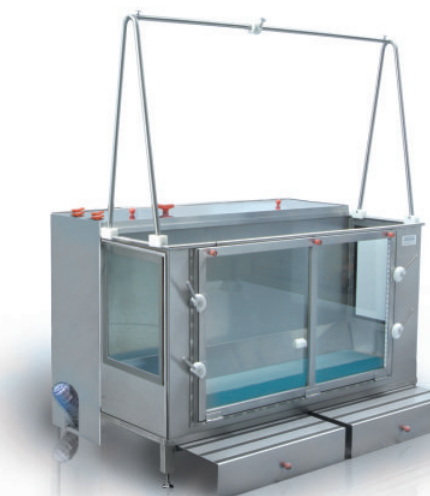

### El servicio incluye la entrega, la instalación y la formación

Para garantizar la mejor relación calidad-precio del mercado, PHYSIO-TECH entrega el producto directamente en el lugar de trabajo y corre a cargo de la instalación y la formación.